

schülke →



アスピロマティック aspirmatic


歯科ユニットおよびアマルガムセパレーターの洗淨、除菌にお使いいただけます。中性のためユニット内の排水管にやさしく、低発泡性で使いやすいうえ、さわやかな香りで、消臭効果も期待できます。

特徴

- シロナ、KaVoなどすべての歯科ユニットに使用可能
- シロナ社による適合性試験済み
- 低発泡性
- 微香性
- すべてのアマルガムセパレーターに適合

使用方法

- 午前と午後の診療終了後など、一日1～2回、使用してください。
- ユニット1台につき50倍希釈した調整液（濃度2%）を2L準備してください。
- 調整液が泡立たないように、準備した水道水1960mlに本品40mlを加えてください。
- 2Lの調整液のうち、1.5Lは吸引させ、残りの0.5Lをスピットンに注いでください。
- 30分以上、もしくは1晩、そのまま放置し、次にユニットを使用する前に1Lの水を流してください。

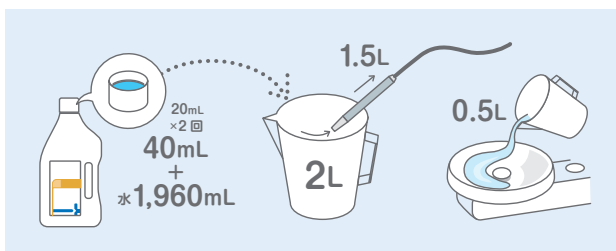

素材適合性

金属類	ステンレス 真鍮 鉄（工具鋼）	銅 亜鉛 アルミニウム
樹脂類	ポリエチレン（PE） ポリスチレン（PS） ABS樹脂 アクリル ポリカーボネート（PC）	ポリアセタール ポリエチレンテレフタレート（PET） ポリアミド ポリスルホン ポリ塩化ビニル（PVC）
ゴム類	天然/スチレンブタジエンゴム エチレンプロピレンジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム クロロプレンゴム	フッ素ゴム ポリ塩化ビニル シリコンゴム ウレタンゴム

試験では、通常の使用で想定される接触時間を考慮しています。ただし、ゴム類に関しては、同じ素材でもメーカーによって違いがみられることがありますので目立たない場所で試してからご使用ください。

微生物に対する除菌方法

微生物名	調整液	浸漬時間
細菌およびエンベロープウイルス等*	50倍希釈（濃度2%）	30分

*EN（欧州基準）およびDWW/RKIガイドラインに準じた評価をしております。詳細についてはお問い合わせください。

アスピロマティック

aspirmatic

使用上の注意

- ご使用前には、必ず製品ラベルを確認してください。
- ほかの薬液や洗浄液と混合しないでください。
- 作業の際には、保護手袋や保護メガネをしてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、口をすすいでください。
無理に吐かせることはしないでください。
- 万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
コンタクトレンズが容易に外せる場合は外して洗浄してください。
- 皮膚にかかった場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、
皮膚を流水で洗ってください。
- 容器は移し替えず、フタをしっかりと閉めて、凍結、熱、直射日光を避け、
室温で保存してください。
- 内容物、容器は地域の規則に従って破棄してください。

製品情報

成分：塩化ジオクチルジメチルアンモニウム、
非イオン系界面活性剤、石鹼、香料、防錆剤 他

色：青

比重：0.99g/cm³ (20℃)

pH：6.5～7.5 (20℃、濃縮液)

製品名	内容	JANコード
アスピロマティック	2L/本	4032651501090

エア・リキードのヘルスケア事業

病院で使用される各種ガス、在宅医療サービス、衛生関連製品、医療機器、スペシャリティーケミカル製品を取り扱っています。全世界で合計約7,500の医療機関と約120万人の患者様にサービスを提供しています。

Schülke&Mayr社(シュルケ&マイヤー社)

エア・リキードグループのヘルスケア関連会社で、とくに感染予防のエキスパートとして、医療機関内の環境と患者様の安全の向上に資する製品事業で130年の歴史を有しています。

【発売元】 日本エア・リキード合同会社

〒108-8509 東京都港区芝浦3丁目4番1号 グランパークタワー
Tel:03-6414-6539 Fax:03-3453-0207 www.schuelke.jp