

schülke +



デントボン dentavon

活性酵素による印象体および補綴物用の
洗浄・除菌剤です。

汚れ、血液、唾液を溶解し、歯石の除去を
促進します。

アルジネート、シリコン、ポリエーテルの
印象体に使用できます。

特徴

- 活性酵素により除菌
- 印象体よくなじみ、洗い流しも容易
- 汚れ、血液、唾液を溶解し、歯石の除去を促進

使用方法

- 付属のスプーン1杯分(20g)を水道水2Lに溶解させ、1%の調整液を作成してください。
- 印象体および補綴物は流水で洗い流し、調整液に5～30分浸漬させてください。使用濃度と浸漬時間は守ってください。
- 浸漬後は、流水ですすいでください。
- 調整液は1日間、使用可能ですが汚れが目立ってきた場合には、早めに交換してください。

使用上の注意

- ご使用前には、必ず製品ラベルを確認してください。
- 作業の際には、保護手袋や保護メガネをしてください。
- 敏感な素材に対しては脱色作用があります。
- 調整液は、超音波洗浄機でも使用していただけますが、調整液が温められることにより、使用可能な時間は約4-5時間に短縮されます。
- 誤って飲み込んだ場合は、口をすすいでください。水を飲んで無理に吐かせることはしないでください。
- 皮膚にかかった場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水で洗ってください。
- 眼に入らないように注意してください。万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 凍結、熱、直射日光を避けてください。容器を移し替えず、室温で保存してください。
- 内容物、容器は地域の規則に従って廃棄してください。

製品情報

成分：ペルオキシ硫酸カリウム、陰イオン界面活性剤、
非イオン系界面活性剤、石鹼、ホスホン酸、香料 他
色：白

製品名	内容	JANコード
デントボン	900 g/本	4032651252039

エア・リキードのヘルスケア事業

病院で使用される各種ガス、在宅医療サービス、衛生関連製品、医療機器、スペシャリティーケミカル製品を取り扱っています。全世界で合計約7,500の医療機関と約120万人の患者様にサービスを提供しています。

Schülke&Mayr社(シュルケ&マイヤー社)

エア・リキードグループのヘルスケア関連会社で、とくに感染予防のエキスパートとして、医療機関内の環境と患者様の安全の向上に資する製品事業で130年の歴史を有しています。

【発売元】 日本エア・リキード合同会社

〒108-8509 東京都港区芝浦3丁目4番1号 グランパークタワー
Tel:03-6414-6539 Fax:03-3453-0207 www.schuelke.jp