

# schülke →



医療機器および医療器具の洗浄、除菌剤です。  
特に超音波洗浄で高い洗浄力を発揮しますので、  
病院や医療機関などでの再生処理に幅広くお使い  
いただけます。

## ギガセプト インスツルAF gigasept instru AF

### 特徴

- 細菌、ウイルスなどへの除菌効果を発揮
- 高い洗浄力
- 超音波洗浄機の使用で、洗浄時間を短縮
- 微香性
- アルデヒド非含有

### 使用範囲

内視鏡を除くすべての医療機器の洗浄と除菌ができます。  
特に超音波洗浄機を使用した場合の洗浄力が高く、細菌、真菌など  
幅広く除菌ができるため、病院や医療機関などの再生処理に  
幅広くお使いいただけます。

### 使用方法

- 本品は濃縮液ですので、水道水で33倍に希釈して  
お使いください。(濃度3%)  
970mLの水道水に本品30mLを加えると調整液が1Lできます。
- 手術器具などは、使用後すぐに調整液に浸漬させてください。  
その際、対象物が水面上に出ていないことや、内部の空気が  
抜けていることを確認してください。  
浸漬時間の目安:15分  
超音波洗浄の目安:5分
- 浸漬後は、洗浄液が残らないように清浄水で  
洗い流してください。
- 洗浄・除菌後は、各器具メーカーによる推奨方法に従って  
消毒・滅菌をおこなってください。
- 配合成分が安定しているため、超音波洗浄機による洗浄には、  
特に適しています。

### 素材適合性

|     |  |                                  |
|-----|--|----------------------------------|
| 金属類 | ステンレス<br>真鍮<br>アルミニウム  | 銅<br>亜鉛                          |
| 樹脂類 | ポリエチレン (PE)<br>ポリスチレン (PS)<br>ポリアセタール<br>ポリエチレンテレフタレート (PET) | ポリアミド<br>ポリスルホン<br>ポリ塩化ビニル (PVC) |
| ゴム類 | 天然ゴム*1<br>エチレンプロピレンジエンゴム<br>ブチルゴム                            | フッ素ゴム<br>シリコンゴム                  |

試験では、通常の使用で想定される接触時間を考慮しています。  
ただし、ゴム類に関しては、同じ素材でもメーカーによって違いがみられること  
がありますので目立たない場所で試してからご使用ください。

\*1 黒色を除く

### 微生物に対する除菌方法

| 微生物名                  | 調整液          | 浸漬時間          |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 細菌および<br>エンペロープウイルス等* | 33倍希釈 (濃度3%) | 15分           |
|                       |              | 5分<br>(超音波洗浄) |

\* EN (欧州基準) およびDWW/RKIガイドラインに準じた評価をしております。  
詳細についてはお問い合わせください。

# ギガセプト インスツルAF

## gigasept instru AF

### 使用上の注意

- ご使用前には、必ず製品ラベルを確認してください。
- 本品は、他の製品(特にアルデヒド含有製品)と混合すると沈殿、脱色、除菌効果の低減が起きますので、本品を使用する前には、コンテナや容器をよくすすいでください。
- 作業の際には、保護手袋をし、製品が皮膚につかないようにしてください。
- 蒸気を吸い込まないでください。
- 誤って飲み込んだ場合は、口をすすぎ、直ちに医師に連絡してください。
- 皮膚にかかった場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水で洗ってください。
- 万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。コンタクトレンズが容易に外せる場合は外して洗浄してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 容器を移し替えず、フタをしっかりと閉めて、室温で保存してください。
- 内容物、容器は地域の規則に従って廃棄してください。

### 製品情報

成分：ココスプロピレンジアミングアニジンジアセテート、  
フェノキシプロパノール、塩化ベンザルコニウム、  
N-ドデシルトリメチレンジアミン、  
非イオン系界面活性剤、香料 他

色：緑

比重：0.99g/cm<sup>3</sup>(20℃)

pH：9(20℃、濃縮液)

| 製品名           | 内容   | JANコード        |
|---------------|------|---------------|
| ギガセプト インスツルAF | 2L/本 | 4032651074136 |

#### エア・リキードのヘルスケア事業

病院で使用される各種ガス、在宅医療サービス、衛生関連製品、医療機器、スペシャリティーケミカル製品を取り扱っています。全世界で合計約7,500の医療機関と約120万人の患者様にサービスを提供しています。

#### Schülke&Mayr社(シュルケ&マイヤー社)

エア・リキードグループのヘルスケア関連会社で、とくに感染予防のエキスパートとして、医療機関内の環境と患者様の安全の向上に資する製品事業で130年の歴史を有しています。

#### 【発売元】 日本エア・リキード合同会社

〒108-8509 東京都港区芝浦3丁目4番1号 グランパークタワー  
Tel:03-6414-6539 Fax:03-3453-0207 [www.schuelke.jp](http://www.schuelke.jp)