

# schülke →



医療機器や環境表面に使用できる濃縮タイプの洗浄・除菌剤です。医療施設の壁や床、アクリルを含む様々な医療機器の表面にお使いいただけます。

## テラリン プロテクト terralin protect

### 特徴

- 高い洗浄力
- 微香性
- アルデヒド非含有

### 使用方法

- 本品は濃縮液ですので、水道水で200倍に希釈してお使いください。(濃度0.5%)
- 塩化ビニル、リノリウム、ラバー素材の床にご使用いただけます。その際には、モップなどを使用した二度拭きを推奨しています。まず、調整液を十分に含んだモップで、床を拭いてください。数分後、調整液に浸して固く絞ったモップで再び床を拭き、自然乾燥させてください。これにより、取り切れなかったゴミ・埃と同時に余分な成分も除去し、べたつきを抑えることができます。
- 医療機器の表面に使用する際は、布などに含浸させて清拭してください。表面が十分濡れていることを確認し、しばらく放置してください。その後、水拭きする場合は注意して行ってください。
- 他の洗剤などと混合しないでください。

### 素材適合性

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 金属類 | ステンレス<br>真鍮<br>アルミニウム   | 銅<br>亜鉛   |
| 樹脂類 | ポリエチレン (PE)<br>ポリスチレン (PS)<br>ABS樹脂<br>アクリル<br>ポリカーボネート (PC)    | ポリアセタール<br>ポリエチレンテレフタレート (PET)<br>ポリスルホン<br>ポリ塩化ビニル (PVC) |
| ゴム類 | 天然/スチレンブタジエンゴム<br>エチレンプロピレンジエンゴム<br>ニトリルゴム<br>ブチルゴム<br>クロロプレンゴム | フッ素ゴム<br>ポリ塩化ビニル<br>シリコンゴム<br>ウレタンゴム                      |

試験では、通常の使用で想定される接触時間を考慮しています。ただし、ゴム類に関しては、同じ素材でもメーカーによって違いがみられることがありますので目立たない場所で試してからご使用ください。

### 微生物に対する除菌方法

| 微生物名              | 調整液                | 接触時間 |
|-------------------|--------------------|------|
| 細菌およびエンベロープウイルス等* | 200倍希釈<br>(濃度0.5%) | 60分  |

\* EN (欧州基準) およびDW/RKIガイドラインに準じた評価をしております。詳細についてはお問い合わせください。

# テラリン プロテクト

## terralin protect

### 使用上の注意

- ご使用前には、必ず製品ラベルを確認してください。
- 作業の際には、保護手袋や保護メガネをしてください。
- 換気の良い場所でお使いください。
- 誤って飲み込んだ場合は、口をすすぎ、直ちに医師に連絡してください。
- 皮膚にかかった場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水で洗ってください。
- 万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。コンタクトレンズが容易に外せる場合は外して洗浄してください。直ちに医師に連絡してください。
- 容器は移し替えず、使用後はフタをしっかりと閉めてください。凍結、熱、直射日光を避け、室温で保存してください。
- 内容物、容器は地域の規則に従って破棄してください。

### 製品情報

成分：第四級アンモニウム塩、フェノキシエタノール、アミン、非イオン系界面活性剤、香料 他

色：緑

比重：1.0g/cm<sup>3</sup>(20℃)

pH：8.6(20℃、濃縮液)

| 製品名        | 内容   | JANコード        |
|------------|------|---------------|
| テラリン プロテクト | 2L/本 | 4032651816040 |

#### エア・リキードのヘルスケア事業

病院で使用される各種ガス、在宅医療サービス、衛生関連製品、医療機器、スペシャリティーケミカル製品を取り扱っています。全世界で合計約7,500の医療機関と約120万人の患者様にサービスを提供しています。

#### Schülke&Mayr社(シュルケ&マイヤー社)

エア・リキードグループのヘルスケア関連会社で、とくに感染予防のエキスパートとして、医療機関内の環境と患者様の安全の向上に資する製品事業で130年の歴史を有しています。

#### 【発売元】 日本エア・リキード合同会社

〒108-8509 東京都港区芝浦3丁目4番1号 グランパークタワー  
Tel:03-6414-6539 Fax:03-3453-0207 [www.schuelke.jp](http://www.schuelke.jp)